



1

Ausgangssituation




2

Schleimhaut- Dicken- Messung



3

Bsp.: 4mm Gingiva bis zum Periost

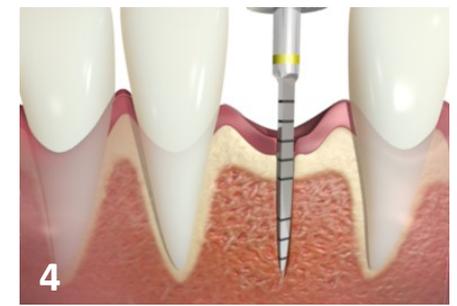

4

Mit 250 U/ Min ,gelbe' Bohrung'  
(im Oberkiefer die einzige Bohrung!)



5

Knochen- Kavität



6

Erste ,KKK'  
(Knochen- Kavitäten- Kontrolle)



7

Im UK auch ,schwarze' Bohrung',  
im D1- K. evtl. ,ausleiern' / & weißen Drill



8

Zweite ,KKK'  
(Knochen- Kavitäten- Kontrolle)



9

Condenser 2,4 mm Durchmesser  
für Knochenkavitäten von 2 – 20 mm



10

Condenser 3,0 mm Durchmesser  
für Knochenkavitäten von 2 – 20 mm



11

Finale ,KKK'  
vor dem Inserieren des Champions®...



12

...dessen Primärstabilität '  
zwischen 40 und 70 Ncm liegen sollte



13

Fakultatives Zementieren und Präparation von ,Prep Caps'  
(in 15 verschiedenen Formen, Divergenzen und Einzementierungshöhen erhältlich!)



14



15

Einzementierte Zirkonkrone

**Champions®**  
**Insertions-**  
**Anleitung**